

## 福祉用具点検表

居宅支援事業所名	ケアマネージャー
明神介護支援事業所	谷村 祐花 様

利用者名	住所	電話番号
遠藤 理恵 様	三原市遠藤町10000-10	0848-00-1009

下記の通り点検いたしました。 点検日 年 月 日 下記の点検を確認しました。(ご利用者・ご家族のご確認)  
国際介護事業所

点検者 \_\_\_\_\_ お名前 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

点検結果 : 正常 A : 調整 C : 交換 x : 修理

<p><b>【電動車いす】(00152-000002)</b></p> <p><input type="checkbox"/> バッテリー残量計の正常動作。</p> <p><input type="checkbox"/> ヘッドランプは正常に点灯し汚損がない。</p> <p><input type="checkbox"/> ウィンカーランプは正常に点滅し汚損がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 電源キーは正常に作動する。</p> <p><input type="checkbox"/> 前後進切替スイッチは正常に作動する。</p> <p><input type="checkbox"/> 後進時に警告音が正常に鳴る。</p> <p><input type="checkbox"/> ホーンが正常に鳴る。</p> <p><input type="checkbox"/> アクセルレバーはスムーズに作動する。</p> <p><input type="checkbox"/> クラッチは正常に作動する。</p> <p><input type="checkbox"/> モーターは異常音がない。</p> <p><input type="checkbox"/> ギヤケースに油漏れはない。</p> <p><input type="checkbox"/> タイヤの空気圧は正常であり、亀裂・破損・磨耗はない。</p> <p><input type="checkbox"/> バックミラーに汚損がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 電気配線、コードに破損や緩みはない。</p> <p><b>【車いす付属品クッション】(00170-000268)</b></p> <p><input type="checkbox"/> シミ・汚れはない。</p> <p><input type="checkbox"/> 十分な弾力を保っている。</p> <p><b>【電動ベッド】(00170-000327*02)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ベッド周辺のスペースが確保されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 水平な床に設置されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 脚座(4カ所)すべてがはまり、プッシュベルトが取り付けられている。</p> <p><input type="checkbox"/> リンク受キャップ(4カ所)すべてがはまり、裏側にスナップピンが差し込まれている。</p> <p><input type="checkbox"/> ハイローアクチュエーターのロッドとハイローリンクの連結ピン(小)にスナップピンが差し込まれている。</p> <p><input type="checkbox"/> 電源コードはベースフレームの下側に配線されてい</p>	<p>る。</p> <p><input type="checkbox"/> 電源コードは可動部と接触していない。</p> <p><input type="checkbox"/> 背ボトムは蝶ボルト、蝶ナットで締め付けられている。</p> <p><input type="checkbox"/> 足ボトムの連結ピン(大)にスナップピンが差し込まれている。</p> <p><input type="checkbox"/> オプション受は最後まで引出してから、蝶ナットで締め付けられている。</p> <p><input type="checkbox"/> アクセサリー枠と駆動部は、頭側、足側ともにノブボルト(黒)で締め付けられている。</p> <p><input type="checkbox"/> プラグをコンセントに差し込むと手元スイッチのランプが点灯する。</p> <p><input type="checkbox"/> 手元スイッチの「下がる」ボタンを一つずつ押したとき、ランプが点滅する。</p> <p><input type="checkbox"/> 手元スイッチで背ボトムを一番上まであげたとき、家具などに接触しない。</p> <p><input type="checkbox"/> 背を上げたままベッドの高さを一番上まで上げたとき、家具などに接触しない。</p> <p><b>【マットレス】(00170-000286)</b></p> <p><input type="checkbox"/> シミ・汚れはない。</p> <p><input type="checkbox"/> 十分な弾力を保っている。</p> <p><b>【サイドレール】(00170-000248)</b></p> <p><input type="checkbox"/> サイドレールはベッドボード・フットボードから大きくとび出さない向きに取り付けている。</p>
--	--

備考

<hr/> <hr/>
-------------